




KRÁTKÝ REKONSTRUKČNÍ HŘEB

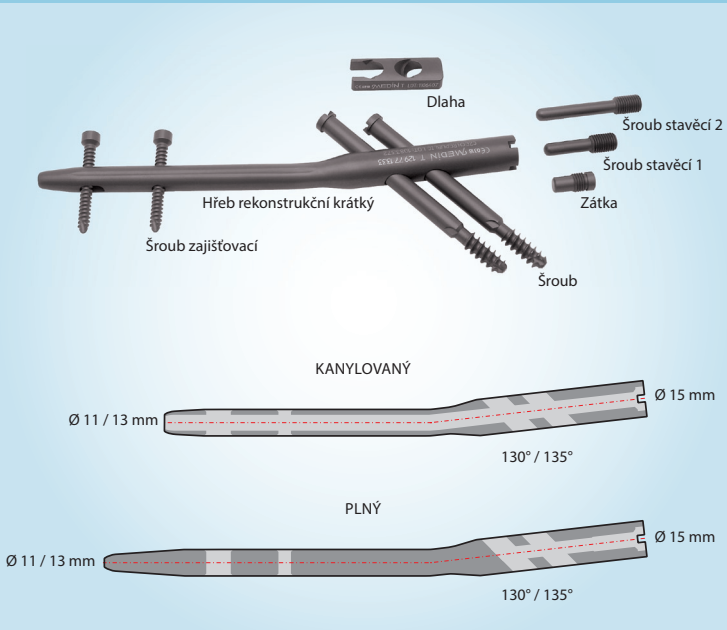


POLOHA PACIENTA NA OPERAČNÍM STOLE

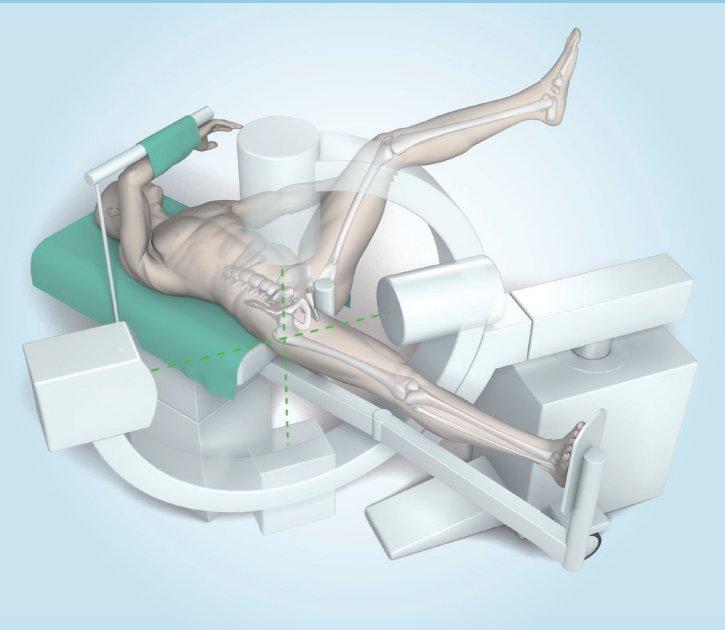


VSTUPNÍ OTVOR

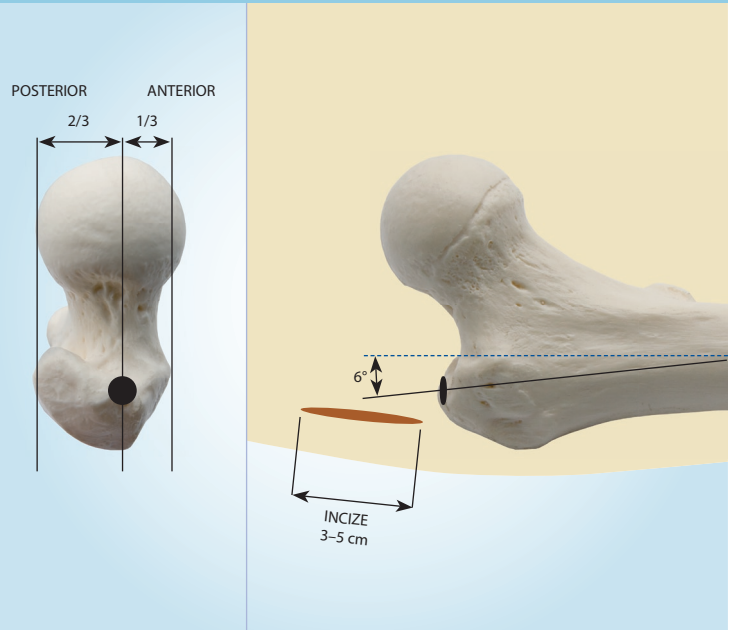


PŘEDVRTÁNÍ NITRODŘEŇOVÉHO KANÁLU

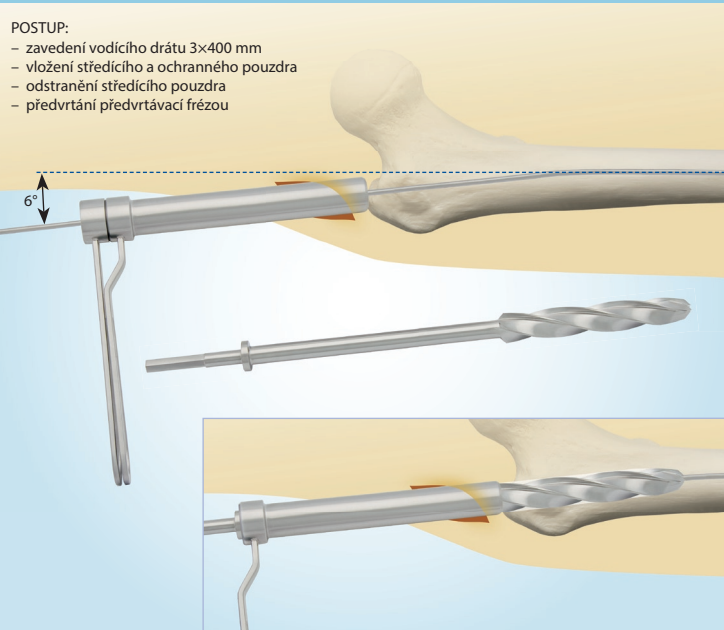


ZAVEDENÍ HŘEBU

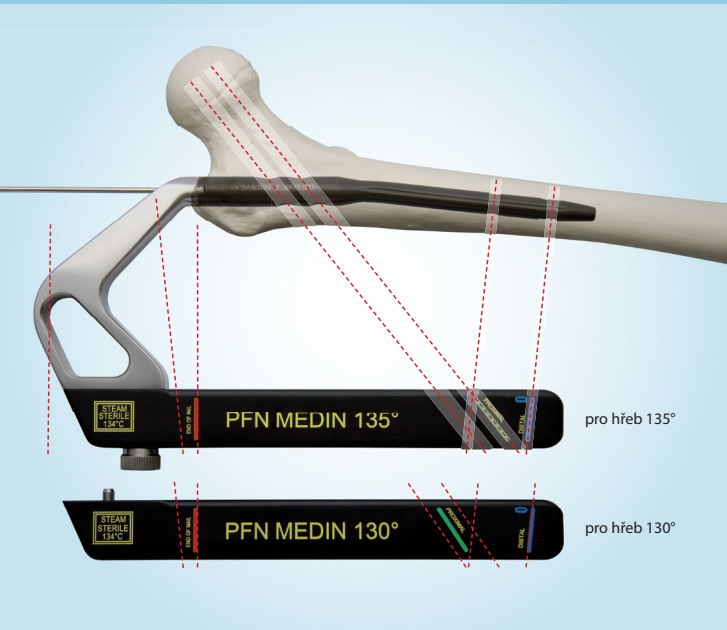


NASTAVENÍ RTG ZAŘÍZENÍ V AXIÁLNÍ PROJEKCI

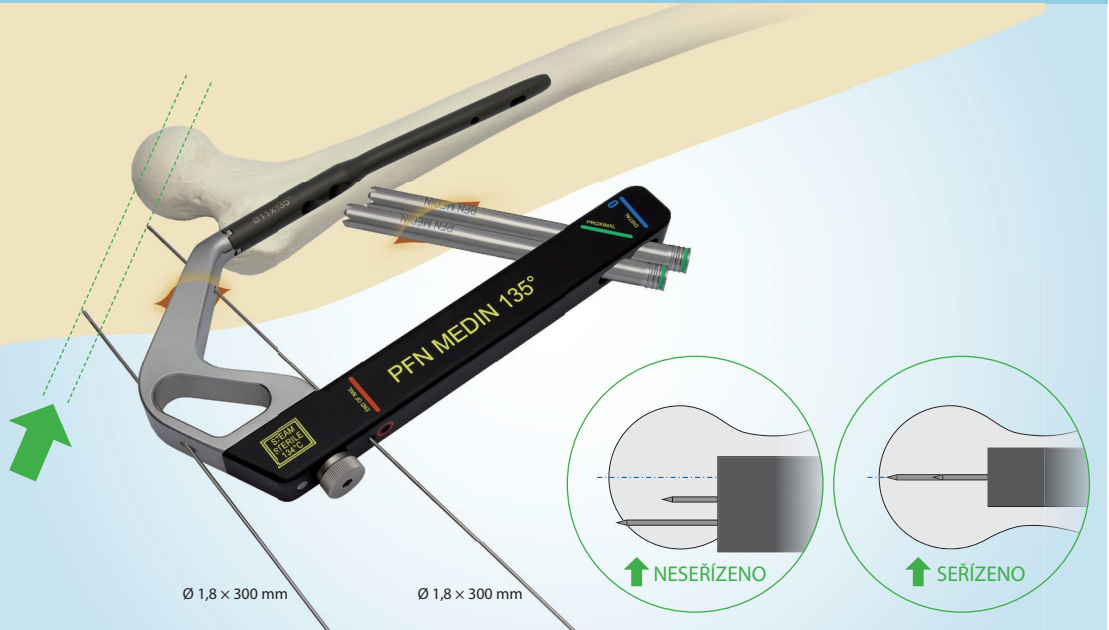


NASTAVENÍ RTG ZAŘÍZENÍ VE DVOU PROJEKcích

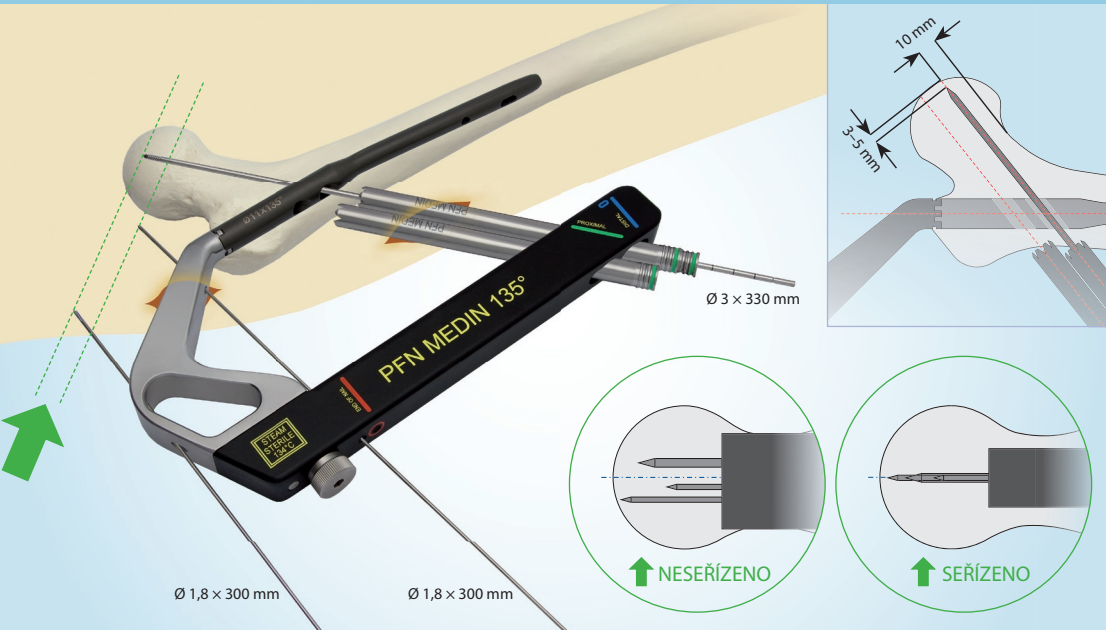


ODMĚŘENÍ DÉLKY DISTÁLNÍHO ŠROUBU

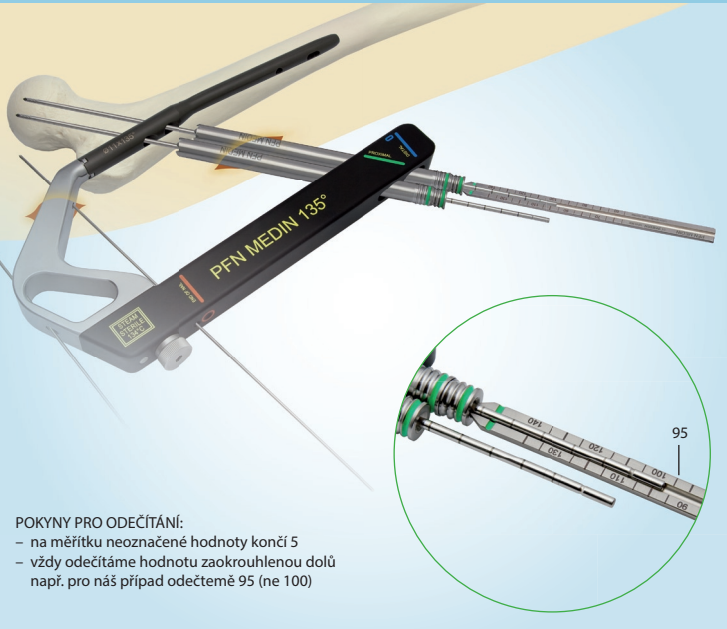


PŘEDVRTÁNÍ DISTÁLNÍHO OTVORU

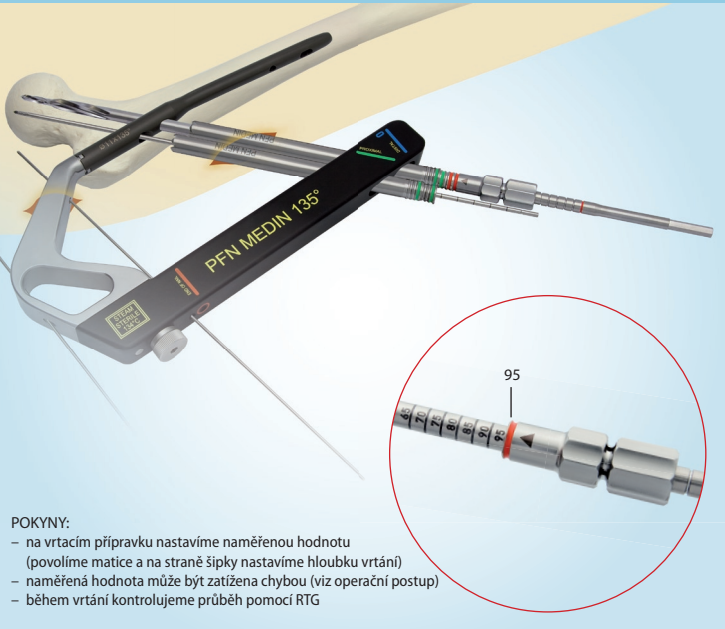

ZAVEDENÍ DISTÁLNÍHO ŠROUBU

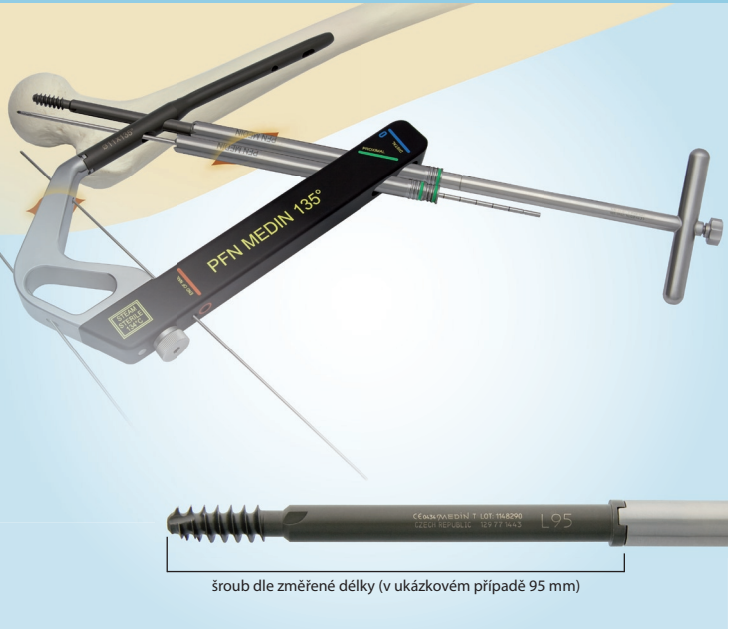

DISTÁLNÍ JIŠTĚNÍ

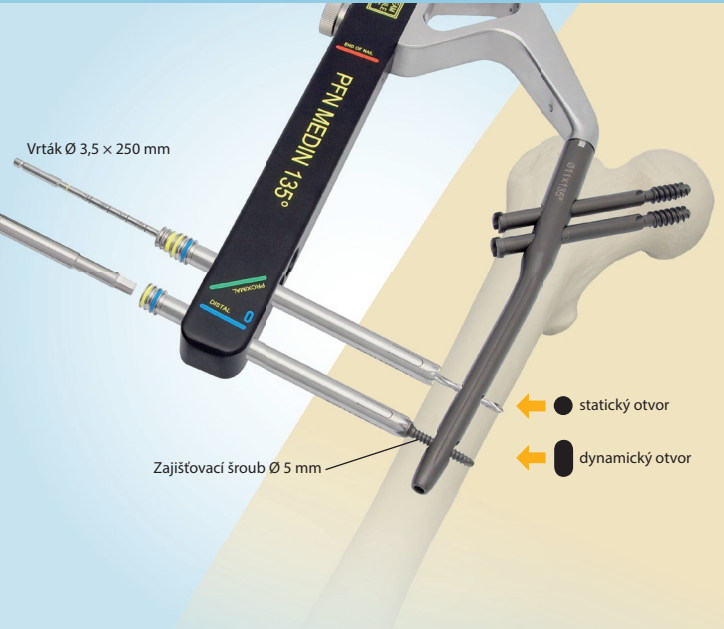

POKYNY PRO ODEČTÁNÍ:
– na měřítku neoznačené hodnoty končí 5
– vždy odečítáme hodnotu zaokrouhlenou dolů
např. pro náš případ odečteme 95 (ne 100)




POKYNY:
– na vrtacím přípravku nastavíme naměřenou hodnotu
(povolíme matice a na straně šipky nastavíme hloubku vrtání)
– naměřená hodnota může být zatížena chybou (viz operační postup)
– během vrtání kontrolujeme průběh pomocí RTG

šroub dle změřené délky (v ukázkovém případě 95 mm)

● statický otvor
● dynamický otvor
Zajišťovací šroub Ø 5 mm

SOUBOR NÁSTROJŮ PRO KRÁTKÝ REKONSTRUKČNÍ HŘEB
129 69 5770

1	129 69 5310	Cílič PFN MEDIN 130°a 135°	1
2	129 69 8130	Šroub cíliče, vnitřní šestihran 7 mm	2
3	129 69 5330	Pouzdro Ø12/Ø10	2
4	129 69 5340	Pouzdro Ø10/Ø3	2
5	129 69 5350	Pouzdro Ø10/Ø8P	2
6	129 69 5360	Pouzdro Ø10/Ø8D	1
7	129 69 5370	Pouzdro Ø10/Ø3,5	1
8	129 69 5380	Důlčík Ø8	1
9	129 69 5390	Důlčík Ø10	1
10	129 69 5400	Měrka	1
11	129 69 5410	Vrtací přípravek	1
12	129 69 5420	Fréza kanylovaná	1
13	129 69 5430	Šroubovák	1
14	129 69 5660	Náražeč	1
15	129 69 2140	Hloubkoměr	1
16	129 79 4991	Vrták Ø3,5	1
17	129 69 5470	Fréza předvrtávací	1
18	129 69 5480	Pouzdro středící	1
19	129 69 5490	Pouzdro ochranné	1
20	129 69 5500	Drát vodící Ø3 L330	3
21	129 69 5510	Drát vodící Ø3 L400	2
22	129 69 5520	Perforátor ruční	1
23	129 69 8050	Klíč, šestihran 7 mm	1
24	129 69 1590	Klíč	1
25	129 69 5700	Klíč univerzální	2
26	129 69 5670	Kladivo (tyč, závaží 1000 g, držadlo)	1
27	129 09 0700	Perforátor zahnutý K12	1
28	129 09 2560	K-drát 1,8x300	3

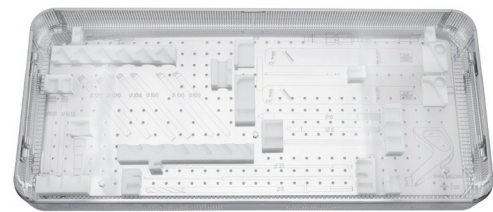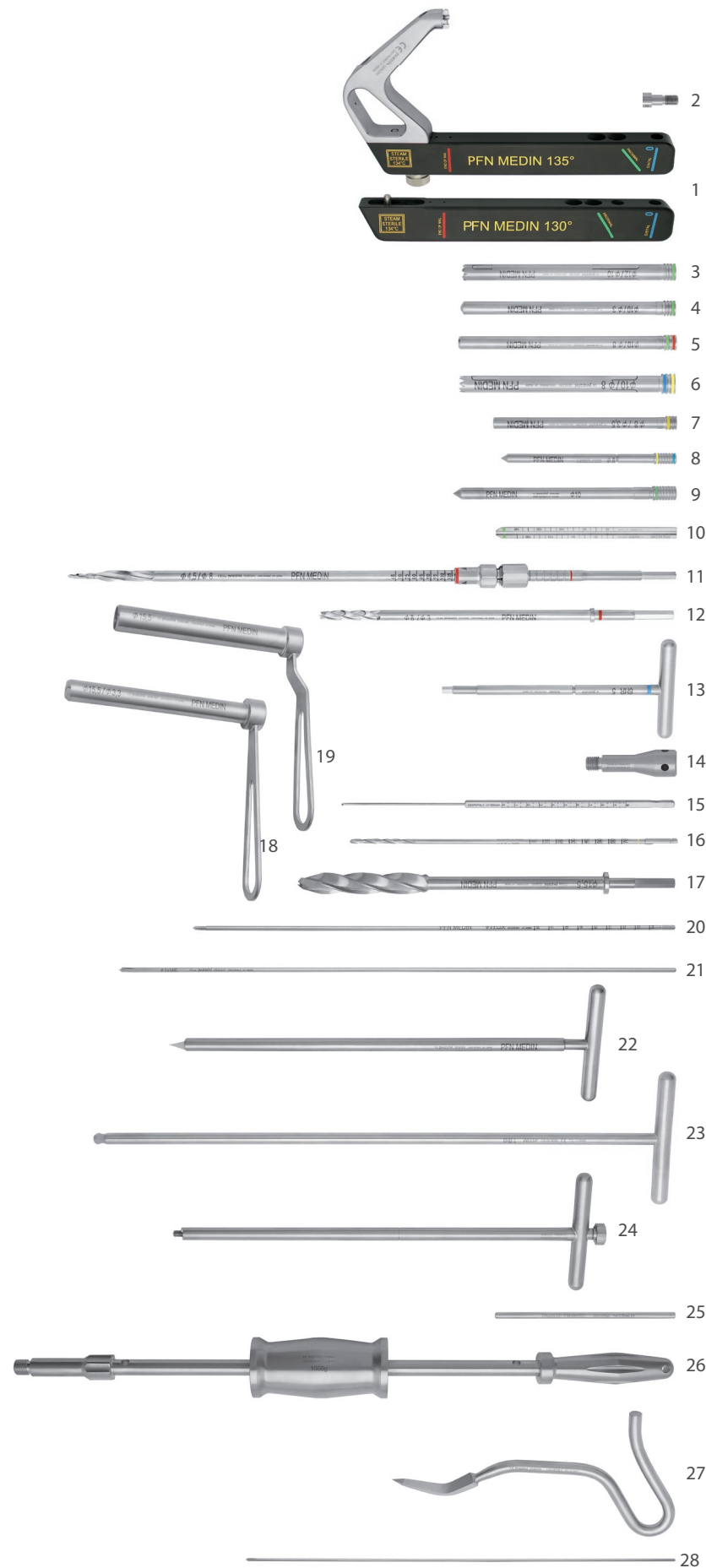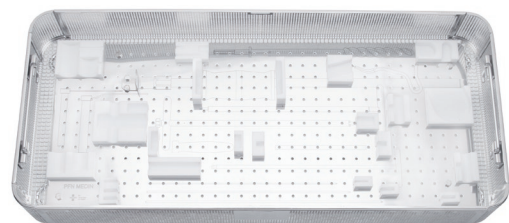
SÍTO 1
129 69 5580

SÍTO 2
129 69 5590

HŘEB REKONSTRUKČNÍ KRÁTKÝ
PROXIMÁLNÍ FEMORÁLNÍ HŘEB

INDIKACE: umožňuje syntézu tříštivé pertrochanterické, intertrochanterické, horní subtrochanterické zlomeniny a jejich kombinace se zlomeninou krčku



OCELOVÉ PROVEDENÍ
TITANOVÉ PROVEDENÍ



CÍLIČ PFN MEDIN
130° / 135°

RTG průhledná ramena
důkladná kontrola pozice v axiální projekci